

NOTICE D'UTILISATION PRIMAPLAST 18 SUPER SOUPLE :

Fabriqué en France

MATERIAU SPECIFIQUE DESTINE A L'ORTHOPLASTIE :

Matériau silicone vinyl polysiloxane réticulant par addition

Caractéristique :

- haute viscosité, excellentes propriétés mécaniques
- matériau rebasable et façonnable à la fraiseuse
- dureté après mélange 1/1 des parties A & B :
 - Après 10 mn : 16 Shores A
 - Après 24 h : 18 Shores A

Préparation :

Mélanger à la main ou à la spatule les produits A & B, à dose égale, jusqu'à obtention d'une pâte de couleur parfaitement homogène.

- temps de mélange : 30 s à 1 mn
- temps de travail : 2,3 mn à 5 mn
- temps de prise total : 3 à 5 mn (suivant température ambiante)

Précaution d'emploi :

Ne pas intervertir les couvercles des pots ou les cuillères de dosage entre elles.

Stockage :

A conserver dans son emballage à une température n'excédant pas 28 ° C