

**NOTICE D'UTILISATION PRIMAPLAST 8 EXTRA-SOUPLE :**

**Fabriqué en France**

**MATERIAU SPECIFIQUE DESTINE A L'ORTHOPLASTIE :**

Matériau silicone vinyl polysiloxane réticulant par addition

**Caractéristique :**

- haute viscosité, excellentes propriétés mécaniques
- matériau rebasable et façonnable à la fraiseuse
- dureté après mélange 1/1 des parties A & B :
  - Après 10 mn : 7 Shores A
  - Après 24 h : 8 Shores A

**Préparation :**

Mélanger à la main ou à la spatule les produits A & B, à dose égale, jusqu'à obtention d'une pâte de couleur parfaitement homogène.

- temps de mélange : 30 s à 1 mn
- temps de travail : 2,3 mn à 5 mn
- temps de prise total : 3 à 5 mn (suivant température ambiante)

**Précaution d'emploi :**

Ne pas intervertir les couvercles des pots ou les cuillères de dosage entre elles.

**Stockage :**

A conserver dans son emballage à une température n'excédant pas 28 ° C